

Prélèvements de mycologie	
Prélèvement	<p>Lésions cutanées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elles sont grattées à leur périphérie sur le bourrelet inflammatoire avec une curette, un grattoir ou un vaccinostyle • Les squames prélevées sont déposées dans un récipient stérile : petite boîte de pétri => bien fermer la boîte avec du sparadrap <p>Folliculites (infections du poil) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prélèvements de poils à la pince à épiler • Les déposer dans une boîte de pétri <p>Onyxis (infection d'un ou plusieurs ongles) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Couper à la pince les morceaux d'ongles atteints • il est important de prélever à la limite entre la partie malade et la partie saine • racler le lit de l'ongle pour recueillir la poudre nécessaire à l'examen direct • en cas d'aspects cliniques différents, prélever séparément les ongles <p>Teignes du cuir chevelu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prélever les cheveux atteints à la pince à épiler et gratter les croûtes éventuelles • En cas de lésions suppurées, prélever à l'écouvillon
Echantillon	Ongles, cheveux, squames, sérosités, cils...
Matériel	Pince à épiler stérile, ciseaux stériles, pince coupante stériles, écouvillons stériles, curette stérile Boîte de pétri